



Tandem t:slim X2: *Profili Personali*



Your Health, Our Mission



Profili Personali

Il Profilo personale contiene tutte le informazioni relative alla gestione della terapia. Nel Profilo personale il paziente deve inserire:

- **Velocità basale**
- Fattore di Sensibilità (FSI)
- Rapporto insulina Carboidrati (I:C)
- Target glicemico
- Insulina attiva (IOB)
- Opzione Carb (ON/OFF)



Impostazioni pompa

Opzioni → La mia pompa → Profili personali



Nella schermata: «**Impostazioni pompa**» è possibile impostare:

Bolo rapido: consigliato quando l'utente desidera effettuare un bolo rapidamente senza sbloccare la pompa


Bolo max: la massima quantità di insulina erogabile in unica somministrazione (Bolo). Si consiglia di impostarlo tenendo conto del massimo bolo che l'utente effettua in situazioni particolari (ad es: Bolo «Pizza»)



Limite basale: la massima velocità basale impostabile nei Profili personali e per la Basale Temp. Si consiglia di impostarlo valutando la massima velocità basale già presente in tutti i profili personali programmati

Profili Personali

Per accedere: Opzioni → La mia pompa → Profili personali

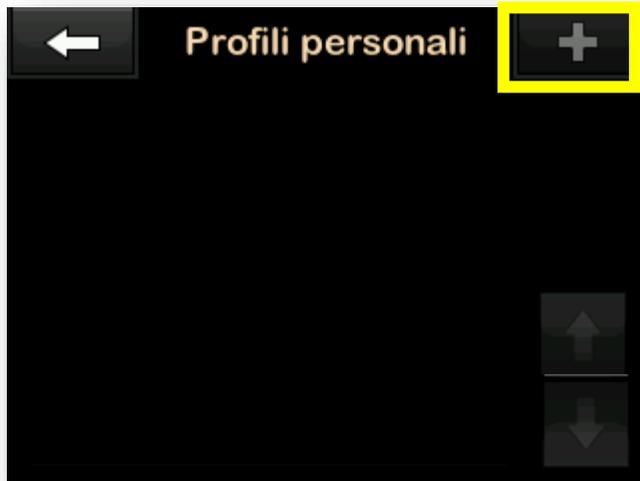

Cliccare sul **+** *per creare un nuovo profilo personale*

Comparirà la tastiera alfanumerica che serve a nominare il profilo

Profili Personali

La schermata è divisa in 2 parti: **Imp segmento** e **Impostazioni bolo**



Segmento temporale (fino a 16):
Basale
FSI
Rapporto I:C
Target glicemia

Impostazioni bolo:
Durata Insulina
Opzione Carboidrati

Profili Personali



In «**Profili personali**» viene richiesto di nominare il profilo

Selezionando «Premere per imp» si apre la schermata dove inserire tutti i parametri (Basale, FSI, I:C, Target Glicemia)



Il primo segmento temporale parte sempre dalla **mezzanotte (00:00)** e non è **modificabile**

Profili Personali



00:00	
Basale	1.0 U/h
FSI	1U:50 mg/dl
I:C	1U:15 g
Target Glicemia	110 mg/dl

Confermare impostazioni?

Basale	1.0 U/h
FSI	1U: 50 mg/dl
I:C	1U: 15g
Target Glicemia	110 mg/dl

X ✓

Imp segmento

00:00

1	1:50	1:15	110
BASALE	FSI	I:C	TARGET

↑
↓

Imp segmento

Basale totale giornaliera 24 U

↑
↓

Una volta confermato il primo segmento temporale la pompa torna alla schermata **Imp segmento**

Si consiglia di verificare sempre la Basale totale giornaliera selezionando la freccia verso il basso soprattutto quando vengono effettuate delle modifiche

Profili Personali



Per aggiungere un nuovo segmento cliccare sul **+** **selezionando l'ora di inizio**



Di default vengono copiate le impostazioni del segmento temporale precedente pertanto **occorre apportare solo le modifiche necessarie**

Quando viene creato un nuovo segmento temporale è necessario impostare l'ora di inizio mentre quella finale verrà definita dall'ora di inizio del segmento successive



L'ultimo segmento temporale termina sempre a mezzanotte (24:00)

Profili Personali

Time	BASALE	FSI	I:C	TARGET
00:00	1	1:50	1:15	110
12:00	0.8	1:50	1:13	110
19:00	1.2	1:50	1:14	110

Tutti i dati impostati dall'utente nei Profili personali possono essere **modificati e/o cancellati**

Se si **utilizzano più Profili personali** è possibile **duplicare** un profilo già creato, **rinominarlo** ed effettuare le modifiche dove necessario

Profili Personali



Nella schermata: «**Impostazioni bolo**» è possibile:

modificare la durata dell'**Insulina Attiva (IOB)** (2-8 ore)

attivare la funzione **Carb** (ON) solo se nel profilo personale attivo è stato inserito il rapporto I:C



Questo permette di effettuare il calcolo del Bolo «Alimenti» mediante l'inserimento dei grammi di carboidrati



Profili Personali (Basale, FSI, I:C, Target) in sintesi

Per creare il Profilo personale entrare in **Opzioni > La mia pompa > Profili personali** cliccare su **+** e la spunta verde 

- Inserire tutti i parametri (Basale, FSI, I:C, Target)
- Il primo segmento temporale parte sempre dalla **mezzanotte (00:00)**
- Inserire l'ora di inizio di un'altra fascia oraria e i parametri che cambiano
- Inserire la IOB e controllare che l'impostazione Carb sia in ON







Tandem t:slim X2: *Modifica Profili Personali*



Your Health, Our Mission


Modifica Profilo personale 1

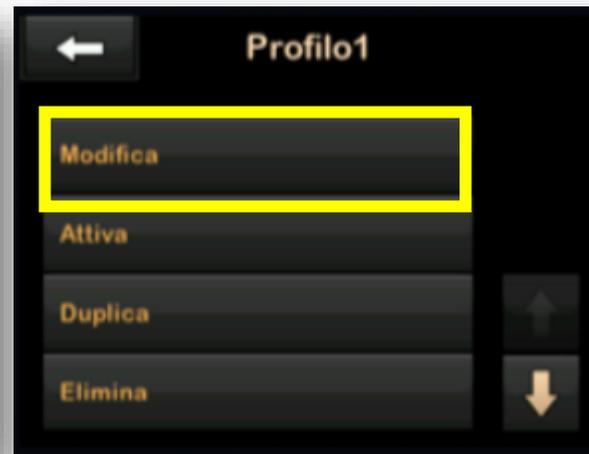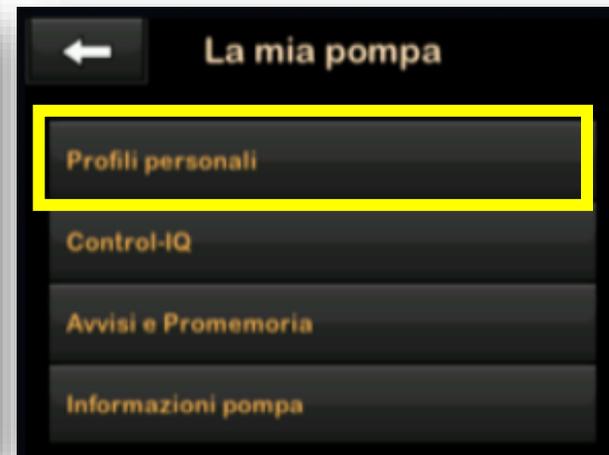

Modifica Profilo personale 1: inserire una nuova fascia oraria



Inserire la nuova ora di inizio: 8:00

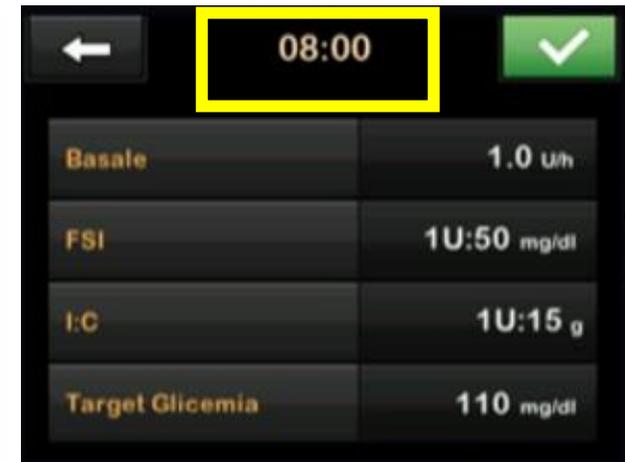

Modificare il parametro indicato dal medico: es basale



Verifica basale totale giornaliera



Cambio Profilo personale



18:29
20 Nov 2022
134 mg/dl
265 U
3 ORE
INSULINA ATTIVA 0 U
OPZIONI BOLO

← Opzioni

ARRESTA INSULINA

Carica

Attività

La mia pompa

← La mia pompa

Profili personali

Control-IQ

Avvisi e Promemoria

Informazioni pompa

← Profili personali +

Impostazioni pompa

Profilo 0 ON

Profilo1 OFF

← Profilo1

Modifica

Attiva

Duplica

Elimina

Il profilo selezionato viene attivato e le sue impostazioni vengono usate per i calcoli delle erogazioni.

Attivare Profilo1?

✕ **✓**

← Profili personali +

Impostazioni pompa

Profilo1 ON

Profilo 0 OFF