



Avvio sessione del sensore



Queste istruzioni sono specifiche per Dexcom G7. Fare riferimento alla guida per l'utente per informazioni sull'avvio di una sessione del sensore Dexcom G6.



Nella schermata iniziale, toccare **OPZIONI**.

■ **Nota:** Queste istruzioni vengono fornite come strumento di riferimento per utilizzatori di pompe e gli operatori sanitari che hanno già familiarità con l'uso di una pompa per insulina e con la terapia insulinica in generale. Non vengono mostrate tutte le schermate. Consultare la guida per l'utente della pompa t:slim X2 per informazioni più dettagliate sul funzionamento.



Toccare la freccia verso il basso e poi toccare **Il mio CGM**.



Se si utilizza per la prima volta un sensore Dexcom G7, toccare **Seleziona sensore**, quindi **Dexcom G7**. Altrimenti, passare al punto 4.



4

Toccare **AVVIO SENSORE G7**.

■ **Nota:** Per evitare errori dei sensori, avviare una nuova sessione SOLO nella pompa per insulina t:slim X2. L'app Dexcom rileverà automaticamente il segnale.



Se l'utente vuole riprendere una sessione del sensore già attiva dopo un ripristino della pompa o un aggiornamento del software, toccare  e poi passare al punto 7. Altrimenti, andare al punto 5 per continuare.



5

Inserire il codice che si trova sul lato dell'applicatore del sensore e toccare  per continuare.


■ **Nota:** Assicurarsi che la pompa e il sensore si trovino entro la distanza massima di 6 m l'una dall'altro senza ostacoli.



6

Toccare **INSERIRE DI NUOVO IL CODICE** per verificare il codice di associazione, quindi toccare  per continuare.

■ **Nota:** Se il codice è valido apparirà una schermata di CONFERMA DEL CODICE. Se non è valido la pompa richiederà di immettere nuovamente il codice.

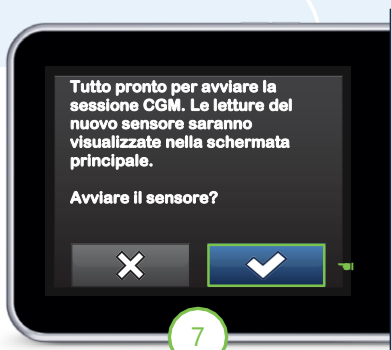

Toccare  per avviare la sessione del sensore.

Apparirà la schermata Sensore Avviato per confermare.



La pompa tornerà alla schermata iniziale con il grafico dell'andamento CGM e il simbolo del conto alla rovescia relativo all'avvio (al tempo di avvio) del sensore.

■ **Nota:** Se si avvia una sessione del sensore già attiva, il periodo di avvio richiede da 5 a 10 minuti. Per una nuova sessione, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti.



Il simbolo si colora di verde con il passare del tempo per mostrare il tempo rimanente.

■ **Nota:** Durante questo periodo di avvio, la pompa non visualizza i dati del sensore né consente l'uso della tecnologia predittiva. Gli utenti dovrebbero continuare a utilizzare un glucometro (BG) e strisce reattive per prendere decisioni terapeutiche.



Dopo il periodo di avvio, inizierà la nuova sessione del sensore.


■ **Nota:** Se viene visualizzato un avviso Sensore Non Avviato contattare l'assistenza Movi. Se gli avvisi e le letture non corrispondono ai sintomi e alle aspettative, utilizzare un glucometro per prendere decisioni sul trattamento del diabete.

Suggerimenti per il collegamento

Se sulla schermata della pompa di insulina compare l'icona Fuori Range (immagine sotto), significa che il sensore non comunica con la pompa.

Quando il sensore non è in grado di fornire una lettura glicemica, viene visualizzato "- - -" al posto del valore glicemico.

- ✓ Per una connettività ideale, si suggerisce di rivolgere lo schermo della pompa verso l'esterno del proprio corpo e indossare la pompa sullo stesso lato del corpo in cui si trova il sensore
- ✓ Assicurarsi che non vi sia nulla che ostacoli il sensore
- ✓ Tenere presente che la comunicazione wireless non è ottimale attraverso l'acqua, poiché il raggio di trasmissione è ridotto

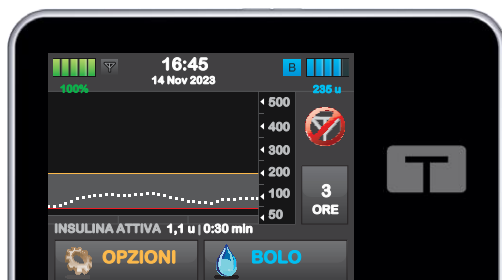

Informazioni importanti sulla sicurezza: La pompa per insulina t:slim X2 è usata per la somministrazione sottocutanea dell'insulina, a velocità fisse e variabili, per la gestione del diabete mellito in soggetti che necessitano insulina. La pompa è in grado di comunicare in modo affidabile e sicuro con dispositivi compatibili collegati digitalmente. La pompa è indicata per l'utilizzo su soggetti a partire dai sei anni di età. La pompa è destinata al singolo utente, all'uso domestico e in alcuni paesi richiede una prescrizione. La pompa è indicata per l'utilizzo solo con l'insulina Humalog U-100. Il Sistema non è indicato per l'utilizzo in donne in stato di gravidanza, persone in dialisi o pazienti critici. Gli utenti della pompa e del Sistema devono: essere disposti ed essere in grado di usare la pompa per insulina, il CGM e altri componenti del sistema secondo le relative istruzioni per l'uso; verificare i livelli glicemici di glucosio nel sangue come raccomandato dal professionista sanitario; dimostrare adeguate competenze per il conteggio dei carboidrati; mantenere sufficienti conoscenze sulla cura autonoma del diabete; consultare regolarmente uno o più professionisti sanitari; e avere vista e/o udito adeguati per riconoscere tutte le funzioni della pompa, compresi gli avvisi. La pompa t:slim X2, il trasmettitore CGM e il sensore devono essere rimossi prima di eseguire RM, TC o trattamento della diatermia. Per ulteriori importanti informazioni di sicurezza visitare tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, Tandem logo e t:slim X2 sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e tutti i relativi loghi e marchi di design sono marchi registrati o marchi di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. ML-1011948_A



TANDEM
Diabetes Care

t:slim X2 Insulin Pump

