


# GUIDA RAPIDA

Versione Software 7.6-7.7

t:slim X2  
Pompa per Insulina  
CON TECNOLOGIA Control-IQ

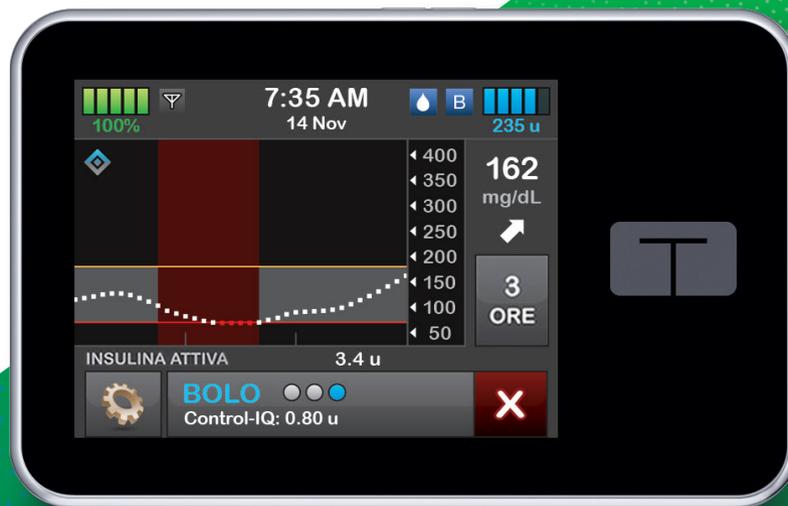

# Informazioni importanti

- La presente Guida rapida fornisce un'istantanea delle funzioni più importanti della pompa per insulina Tandem t:slim X2 e del sistema Dexcom® CGM
- Si raccomanda di consultare la guida per l'utente Tandem t:slim X2 e quella del sistema Dexcom® CGM per istruzioni complete poiché la presente non le sostituisce interamente
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate e le informazioni relative alla sicurezza
- Per qualsiasi informazione clinica fare riferimento al centro diabetologico
- Per eventuali domande, richieste di approfondimento o assistenza sulla pompa Tandem t:slim X2 è possibile rivolgersi al proprio Sales Specialist di zona o al distributore Movì

Per accedere all'assistenza tecnica utilizzare uno dei seguenti canali:



24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Dall'estero\*:  
+39 081 19983409 - 24/7



\*Il numero non è gratuito segue il piano tariffario concordato con il gestore telefonico

# INDICE



Pg 04 ■ **TANDEM T:SLIM X2**

Pg 10 ■ **SOSTITUZIONE SET E CARTUCCIA**

Pg 14 ■ **LA POMPA**

Pg 26 ■ **MONITORAGGIO**

Pg 29 ■ **ALGORITMO**

Pg 35 ■ **INFORMAZIONI UTILI**




Your Health, Our Mission

# TANDEM T:SLIM X2




# Tandem t:simulator App

- È possibile scaricare, su qualsiasi smartphone, il simulatore della pompa per insulina Tandem
- Disponibile per sistemi iOS e Android

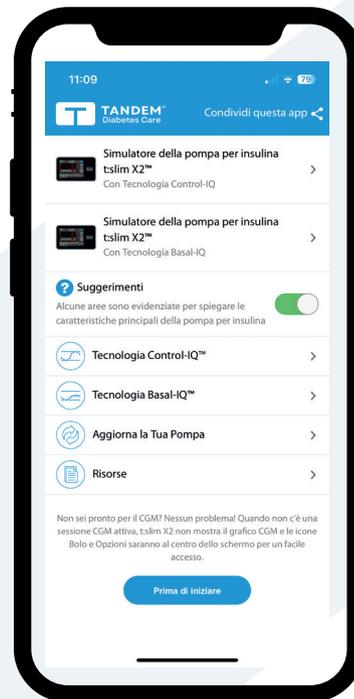

# Descrizione generale

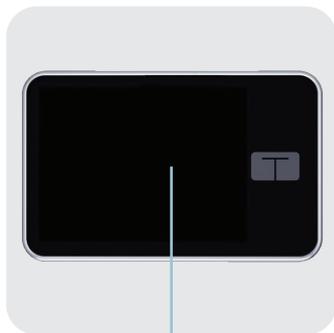

Touchscreen con screen protector



Sistema Micro Delivery



Tasto Schermo ON/Bolo Rapido



Presca d'aria e speaker\*

Rilevatore cartuccia multifunzione

Guide per inserimento cartuccia



Copertura in gomma porta USB.  
Viene fornita nei COMBO KIT.  
Si consiglia di sostituirla ogni 3-6 mesi

Porta USB per ricaricare la pompa, scaricare i dati, effettuare aggiornamenti del software

**\*Importante** lasciare libera la presa d'aria; è consigliato utilizzare il t:case (custodia) presente nell'accessory kit

# Accessory Kit



Cavo per ricaricare  
la pompa, scaricare  
i dati e aggiornare  
il software

t:case  
(custodia)



Screen protector  
(fornito in fase di  
training per pompe vendita)

Chiavetta  
per rimuovere  
la cartuccia

**\*Importante** fare attenzione quando si staccano il trasformatore e l'adattatore dalla presa di corrente

# Schermata HOME



# Icone Schermata HOME

## Tecnologia Control-IQ

Un Colore per ogni «azione» della tecnologia Control-IQ

	Control-IQ	Attività sonno	Attività esercizio
			
 <b>EROGA</b> Eroga un bolo automatico di correzione se il valore CGM del sensore è previsto a 30 minuti essere sopra a 180 mg/dL	180	---	180
 <b>AUMENTA</b> Aumenta l'erogazione di insulina basale se il valore CGM del sensore è previsto a 30 minuti essere sopra a --- mg/dL	160	120	160
 <b>MANTIENE</b> Mantiene le impostazioni attive del profilo corrente se il valore CGM del sensore è previsto a 30 minuti tra --- e --- mg/dL	112.5 - 160	112.5 - 120	140 - 160
 <b>DIMINUISCE</b> Diminuisce l'erogazione di insulina basale se il valore CGM del sensore è previsto a 30 minuti essere sotto --- mg/dL	112.5	112.5	140
 <b>ARRESTA</b> Arresta l'erogazione di insulina basale se il valore CGM del sensore è previsto a 30 minuti essere sotto --- mg/dL	70	70	80

# SOSTITUZIONE SET E CARTUCCIA



# Sostituzione Set infusionale e Cartuccia

- Cartuccia e set infusionale devono essere sostituiti ogni 2-3 gg
- Cartuccia e set infusionale NON devono essere sostituiti prima di andare a dormire poiché, se il set non viene posizionato correttamente, il paziente può trascorrere diverse ore in iperglicemia
- Utilizzare insulina a temperatura ambiente (attendere 30 minuti dopo averla prelevata dal frigorifero)
- È molto importante ruotare i siti di inserzione per evitare la formazione di lipodistrofie che alterano l'assorbimento di insulina
- **Si raccomanda di disconnettere dal corpo il set infusionale prima di effettuare il processo di riempimento del catetere**
- **Disconnettere il set infusionale ESCLUSIVAMENTE dal cerotto e NON DISCONNETTERLO MAI dal raccordo cartuccia-catetere altrimenti si potrebbe causare la somministrazione involontaria (bolo) di insulina o l'ingresso di aria**



Come caricare la cartuccia



Sostituzione della cartuccia vecchia con quella nuova



**Autosoft 90**  
cambio cartuccia e set infusionale



**Autosoft 90**  
cambio set infusionale



**Autosoft 30**  
cambio cartuccia e set infusionale



**Autosoft 30**  
cambio set infusionale



**Varisoft**  
cambio cartuccia e set infusionale



**Varisoft**  
cambio set infusionale



**Trusteel**  
cambio cartuccia e set infusionale



**Trusteel**  
cambio set infusionale

# Punti chiave

- 1** Riempire la siringa con insulina rapida da un minimo di 120 U a un massimo di 300 U
- 2** Inserire la siringa nella cartuccia (l'ago entra per metà o completamente)
- 3** Aspirare l'aria residua in unica volta e rilasciare lo stantuffo
- 4** Estrarre la siringa e togliere l'aria
- 5** Reintrodurre la siringa nella cartuccia e trasferire lentamente l'insulina
- 6** Estrarre la siringa tenendo premuto lo stantuffo
- 7** Prendere la pompa ed entrare nel menù Opzioni > Carica > Sostituisci cartuccia
- 8** Inserire la nuova cartuccia e premere il simbolo del lucchetto
- 9** Collegare la cartuccia al catetere ed eseguire il Riempi Catetere (min 11 U - max 30 U) tenendo la pompa rivolta verso l'alto ed il catetere con l'ago verso il basso per favorire l'uscita delle eventuali bolle d'aria
- 10** Posizionare la Cannula sul corpo ed eseguire il Riempi Cannula (Autosoft 90 6 mm = 0,3 U, Autosoft 90 9 mm = 0,5 U, Autosoft 30 = 0,7 U, Varisoft 13/17 = 0,7 U)
- 11** **Riprendere l'erogazione di Insulina**



# Disconnessione cartuccia/catetere

**Importante:** NON si deve MAI scollegare il raccordo della cartuccia dal catetere  
per evitare che nel ricollegamento accadano le seguenti situazioni:

- Una somministrazione involontaria (bolo) di insulina
- L'ingresso di aria nel catetere del set infusionale

Inoltre un allentamento della connessione tra la cartuccia e il catetere potrebbe causare una perdita di insulina

# LA POMPA

---

LA POMPA



# Icone del Bolo nella schermata iniziale

Dalla versione software 7.6 in poi, vengono visualizzate le icone del bolo nella schermata iniziale in corrispondenza del grafico CGM in basso a destra.

L'erogazione di un bolo è rappresentata da un'icona quadrata di colore blu che si sposterà a sinistra con il passare del tempo, come avviene per le letture del grafico CGM.

È possibile visualizzare tre diverse icone a seconda del tipo di bolo erogato:

- **Bolo Standard** (alimenti o di correzione) rappresentato da un quadrato blu
- **Bolo Esteso** rappresentato da un quadrato blu per la parte iniziale del bolo ("Eroga ora") e una barra a destra del quadrato che verrà visualizzata per la durata della parte estesa del bolo
- **Bolo Automatico di Correzione\*** rappresentato da un quadrato blu con contorno bianco

**\*Importante:** prima di effettuare un bolo alimenti verificare se è stato erogato un bolo automatico di correzione



# Bolo

Entrando nella schermata Bolo è possibile impostare i seguenti tipi di Bolo:

- **Bolo Alimenti** in Unità o Grammi se inserito il rapporto I:C ed attivata la funzione Carb (ON)
- **Bolo Correzione** in caso di sessione CGM attiva, il calcolatore di bolo riporta la lettura CGM istantanea se è presente insieme alla freccia di tendenza
- **Bolo Alimenti + Bolo Correzione**
- **Bolo Esteso** (onda doppia, onda quadra)
- **Bolo rapido** quando si vuole effettuare un bolo senza sbloccare la pompa



Come erogare un bolo

# Bolo esteso

Nelle schermate del Bolo viene visualizzato il calcolo dell'insulina complessiva. È sempre possibile «sovrascrivere» il valore consigliato dal calcolatore di bolo.

Una volta impostato il bolo è possibile decidere di erogare una percentuale “subito” ed una percentuale in un periodo di tempo stabilito dall'utente.

Il bolo esteso è spesso utilizzato in caso di pasti ricchi di grassi che rallentano l'assorbimento dei carboidrati (es: Bolo “Pizza”).



# Stato corrente

Lo Stato corrente informa rapidamente l'utente sulle impostazioni della pompa indicando **la basale corrente, l'ultimo bolo effettuato e le info sulla sessione CGM.**



Selezionando in alto a destra le unità in cartuccia si accede allo **Stato corrente**

È possibile accedere anche con lo schermo bloccato



Impostazioni Pompa



Impostazioni CGM



# Opzioni

In queste schermate è possibile visualizzare tutte le **Opzioni del Menù principale**:



## ARRESTA INSULINA RIPRENDI INSULINA\*

consente di interrompere tutte le erogazioni di insulina/riprendere tutte le erogazioni di insulina

## CARICA

consente di caricare la cartuccia, riempire il set infusoriale, la cannula o l'ago

## ATTIVITÀ

consente di impostare l'Attività Sonno, Esercizio e la Basale Temporanea (se Control-IQ in OFF)

## LA MIA POMPA

consente di accedere alle impostazioni della pompa (Profili personali, Control-IQ, Avvisi e Promemoria, Informazioni pompa)

## IL MIO CGM

consente di visualizzare tutte le opzioni del monitoraggio della glicemia Dexcom

## IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO

consente di personalizzare le impostazioni e le funzioni della pompa

## CRONOLOGIA

consente di visualizzare la storia della pompa e del CGM (monitoraggio della glicemia)

\*L'impostazione predefinita di questo allarme è di 15 minuti. Dalla versione software 7.6 è possibile modificare l'impostazione "Allarme riprendi pompa" a 30 minuti, 45 minuti o 1 ora. È consigliato arrestare l'erogazione di insulina se si disconnette la pompa dal corpo; l'interruzione fa in modo che la tecnologia non continui a calcolare gli aggiustamenti della somministrazione di insulina

# Opzioni

## La mia pompa

In questa schermata è possibile visualizzare:



- **Profili personali** che contengono i principali parametri (Impostazioni pompa, Basale, FSI, I:C, Target glicemia, IOB, Carb ON/OFF) della terapia insulinica impostata dal medico
- **Control-IQ**: per attivare (ON) o disattivare (OFF) l'algoritmo Control-IQ che è disattivato di default. Per attivare Control-IQ occorre inserire il Peso e l'insulina Totale Giornaliera (DTG)
- **Avvisi e Promemoria** per impostare gli avvisi e i promemoria
- **Informazioni pompa** per recuperare il seriale della pompa di insulina

## Impostazioni pompa

In questa schermata è possibile selezionare le **Impostazioni pompa** in cui si trovano:



- **Bolo rapido**: consigliato quando l'utente desidera effettuare un bolo rapidamente senza sbloccare la pompa
- **Bolo max**: la massima quantità di insulina erogabile in unica somministrazione (Bolo). Si consiglia di impostarlo tenendo conto del massimo bolo che l'utente effettua in situazioni particolari (ad es: Bolo "Pizza")
- **Limite basale**: la massima velocità basale impostabile nei Profili personali. Si consiglia di impostarlo valutando la massima velocità basale già presente in tutti i Profili personali programmati

# Opzioni

## La mia pompa Profili personali

Una volta entrati in **Profili Personali** viene richiesto di nominare il profilo.

Selezionando **Prem per imp** si apre la schermata dove inserire tutti i parametri (Basale, FSI, I:C, Target glicemia)

**Attenzione!** Il primo segmento temporale parte sempre dalla mezzanotte (00:00) e non è modificabile.

Una volta confermato il primo segmento temporale la pompa torna alla schermata **Imp segmento**.

Si consiglia sempre di verificare la Basale totale giornaliera, selezionando la freccia verso il basso, quando vengono effettuate delle modifiche.

Per aggiungere un nuovo segmento temporale cliccare su **+**, selezionare l'ora di inizio e confermare con la spunta blu.

Di default vengono copiate le impostazioni del segmento temporale precedente, di conseguenza occorre apportare solo le modifiche necessarie.

Quando viene creato un nuovo segmento temporale è necessario impostare l'ora di inizio mentre quella finale verrà definita dall'ora di inizio del segmento successivo.

L'ultimo segmento temporale termina sempre a mezzanotte (24:00).

Nel Profilo personale in «Impostazioni bolo» è possibile: modificare la durata dell'Insulina Attiva (IOB) (2-8 ore)

attivare la funzione Carb (ON) solo se nel Profilo personale attivo è stato inserito il rapporto I:C.

Questo permette di effettuare il calcolo del bolo "Alimenti" mediante l'inserimento dei grammi di carboidrati.

Tutti i dati impostati dall'utente nei Profili personali possono essere modificati e/o cancellati.

Se si utilizzano più Profili personali è possibile duplicare un profilo già creato, rinominarlo ed effettuare le modifiche dove necessario.

**Attenzione!** Se l'utente programma un Profilo personale che contiene solo la basale (no FSI, I:C e Target glicemia) il calcolatore di bolo non sarà utilizzabile. Se FSI, I:C e Target glicemia vengono impostati in un qualsiasi segmento, il valore scelto verrà copiato in tutti i segmenti presenti e non potrà essere messo a "0"



Come impostare  
un profilo  
personale

# Opzioni

## La mia pompa Avvisi e Promemoria

Si consiglia di impostare:

- Il promemoria **Bolo Pasto mancato** se l'utente mangia in orari regolari
- L'**avviso di Insulina bassa** che informa l'utente quando la cartuccia si sta esaurendo

**N.B:** l'**Avviso Auto-Off** è relativo all'auto spegnimento della pompa in caso di NON interazione protratta con la pompa per il tempo impostato (default OFF)



# Opzioni

## La mia pompa - Informazioni pompa

Quando si contatta l'assistenza per qualunque tipologia di guasto o problema, è necessario comunicare sempre all'operatore del Numero Verde il **Seriale della pompa**.

Nel caso in cui la pompa non risultasse funzionante (display inaccessibile) è possibile visualizzare il **seriale della pompa nell'alloggiamento della cartuccia**.

Tenere a portata di mano il seriale della pompa quando si effettua la registrazione durante l'aggiornamento del software (considerare le cifre dopo il #).



# Opzioni

## Impostazioni dispositivo

In questa schermata è possibile visualizzare

- **Impostazioni display:** per impostare il time-out dello schermo
- **Impostazioni Bluetooth:** per eventuali connessioni con dispositivi mobili abilitati
- **Ora e data:** per impostare o modificare ora e data.  
Verificare periodicamente che questa impostazione sia corretta per consentire una adeguata visualizzazione dei dati scaricati
- **Volume audio:** consente di impostare il volume (avvisi, allarmi, promemoria) compreso il volume degli avvisi CGM
- **PIN di sicurezza:** in caso non si ricordasse il Pin di sicurezza impostato è sempre possibile sbloccare la pompa utilizzando il **Pin di Fabbrica (314159)**



# Cronologia

Nella **Cronologia della Pompa** e nella **Cronologia del CGM**

è possibile recuperare le relative informazioni nel dettaglio per approfondire eventuali situazioni o problematiche riscontrate.

**Importante:** Allarmi, avvisi e promemoria vengono sempre reportizzati preceduti dalle lettere D e C

- **D** (declaration): indica l'ora in cui è stato notificato l'allarme, l'avviso o il promemoria
- **C** (confirmation): indica l'ora in cui l'utente ha letto e ha confermato il messaggio visualizzato sul display della pompa



# MONITORAGGIO



# Dexcom G6 e Dexcom G7

Con il **software 7.7** è possibile scegliere che tipo di sensore utilizzare (Dexcom G6/G7).

Con **Dexcom G7** il periodo di avvio è di soli 30 minuti; una volta terminato compare la lettura glicemica nella schermata iniziale.

Per verificare quanto tempo rimane alla fine della sessione CGM occorre entrare nella *terza pagina dello stato corrente*. Dopo 10 giorni la sessione CGM termina e compaiono delle notifiche a partire dalle 24 ore precedenti; le letture continueranno ad essere visualizzate per un periodo di 12 ore aggiuntive (periodo di tolleranza).



Come applicare  
il sensore  
Dexcom G6



Come applicare  
il sensore  
Dexcom G7



# Informazioni importanti CGM Dexcom

- Applicare il Sensore (ad almeno 8 cm dal set infusionale) nell'addome, sovragluteo o braccio evitando zone con tatuaggi, cicatrici, irritazioni o lipodistrofie. In caso di frequente «Errore Sensore (--- mg/dL)» ruotare il sito di inserzione e si consiglia di applicare un cerotto aggiuntivo per migliorare l'adesività del Sensore alla cute
- Prima di posizionare il Sensore detergere accuratamente la zona scelta.  
Non utilizzare repellenti per insetti, creme solari, profumo o lozioni sulla pelle dove viene applicato il Sensore
- Se si utilizza Dexcom G6 disinfettare SEMPRE con alcool la base del Trasmettitore prima di inserirlo nel Sensore
- Inserendo il Codice Sensore NON occorre inserire alcuna calibrazione
- Se CGM e capillare differiscono più del 20 % contattare sempre il Numero Verde poiché la calibrazione potrebbe non essere risolutiva
- Calibrare il Sensore in stabilità glicemica (valori glicemici allineati per 20 min e freccia orizzontale)
- Non prendere decisioni terapeutiche in assenza di freccia o se le letture non corrispondono ai sintomi
- Il monitoraggio Dexcom NON può essere utilizzato durante risonanza magnetica (RM), tomografia computerizzata (TC), Raggi X o il trattamento elettrotermico ad alta frequenza (diatermia).  
I campi magnetici ed il calore potrebbero danneggiare i componenti generando letture glicemiche inaccurate

# ALGORITMO



# Control-IQ

È possibile attivare (ON) la funzione **Control-IQ** che è **disattivata di default (OFF)**.

Per attivare la funzione **Control-IQ** occorre inserire il **Peso** e l'**Insulina Totale Giornaliera**.

Questi parametri vanno SEMPRE aggiornati qualora variassero in modo significativo.



# Tecnologia Control-IQ

## Attività - Sonno - Esercizio

L'**Attività Esercizio** può essere avviata/arrestata manualmente oppure è possibile impostare un **timer** che consente di programmare la durata (**30 min - 8 ore**); per sapere quanto tempo rimane dell'Attività Esercizio basta entrare in Attività > Esercizio.

Se l'Attività Esercizio è attiva nel momento in cui è programmato l'avvio di un **Programma Sonno**, il Programma Sonno non inizierà. Tuttavia, se la durata pianificata termina o se l'**Attività Esercizio** viene arrestata manualmente durante l'intervallo di tempo in cui è attivo un **Programma Sonno**, il Programma Sonno si avvierà automaticamente.

È consigliato impostare almeno un **Programma Sonno** che si attivi e disattivi automaticamente nei giorni e negli orari stabiliti. Non utilizzare il Programma Sonno se si intende riposare meno di 5 ore.

**Basale Temp** può essere impostata solo se la funzione **Control-IQ è disattivata (OFF)** e consente di modificare (in % e durata) la basale impostata nel Profilo personale attivo.



# Tecnologia Control-IQ

## Avvisi

- **Avviso glicemia bassa:** compare quando la tecnologia Control-IQ prevede a **15 minuti** che la glicemia scenda al di sotto di 70 mg/dL (80 mg/dL se è abilitata l'Attività Esercizio)
- **Avviso glicemia alta:** compare quando la tecnologia Control-IQ ha aumentato l'erogazione di insulina basale, ma rileva ancora un valore glicemico superiore a 200 mg/dL e non prevede una diminuzione della glicemia nei **30 minuti** successivi. Una volta confermato non si presenterà nuovamente nelle prime 2 ore
- **Avviso livello massimo di insulina:** compare quando la pompa ha erogato in 2 ore il 50% della Dose Totale Giornaliera (DTG). L'erogazione di insulina basale viene sospesa e non vengono erogati eventuali Boli Automatici di Correzione. Occorre verificare l'Insulina Totale Giornaliera impostata nella pompa

# Control-IQ

## Fuori Range

- La tecnologia Control-IQ rimane attiva per i primi **15 minuti** di assenza di comunicazione tra il trasmettitore e la pompa per insulina
- **Dopo 20 minuti** di assenza del segnale la tecnologia Control-IQ non è più in grado di modulare l'erogazione di Insulina Basale e di erogare Boli Automatici di Correzione. Viene erogata la basale del Profilo personale attivo
- La tecnologia Control-IQ **si ri-attiva automaticamente** quando **Pompa e Trasmittitore riprendono a comunicare tra loro**

# Tecnologia Control-IQ

- Per attivare la tecnologia Control-IQ che di default è disattivata (OFF) occorre inserire:
- Il Peso, la Dose Totale Giornaliera (DTG), almeno un Profilo personale (completo di Basale, FSI, I:C, Target glicemia) ed inoltre la funzione Carb deve essere attivata (ON)
- Quando la tecnologia Control-IQ è attivata il Target glicemico è impostato automaticamente a 110 mg/dL e la durata dell'Insulina Attiva (IOB) è impostata a 5 ore; entrambi i parametri non sono modificabili
- Se durante l'erogazione di una Basale Temporanea o di un Bolo Esteso la tecnologia Control-IQ viene attivata (ON), i due programmi verranno interrotti
- Quando la tecnologia Control-IQ è attivata (ON) non è possibile impostare una Basale Temporanea
- Quando la tecnologia Control-IQ è attivata (ON) è possibile effettuare un Bolo Esteso con una durata massima di 2 ore
- Se l'erogazione dell'insulina Basale viene sospesa è comunque possibile erogare un Bolo manuale; in caso di Bolo Esteso questo continuerà ad essere erogato

# INFORMAZIONI



# Per la ricarica della batteria

- Controllare periodicamente l'indicatore della batteria
- Caricare la batteria ogni **giorno per 15 - 20 minuti**
- Utilizzare il **cavo ORIGINALE Tandem** per la ricarica
- Durante la ricarica assicurarsi che sia presente il **“fulmine” sull'icona della batteria**
- Quando la **batteria raggiunge il 100% SCOLLEGARE la pompa dalla carica**
- **NON è raccomandato caricare la batteria durante la notte**
- Se viene notificato l'avviso di batteria scarica ricaricarla prima possibile
- Evitare di scaricare la batteria completamente (evitare che la batteria raggiunga lo 0%)
- Se la batteria è completamente scarica (0%) lo schermo potrebbe non accendersi immediatamente quando la pompa viene collegata all'alimentazione
- Tenere sempre **a disposizione un dispositivo di ricarica** portatile per consentire la ricarica in movimento

# Pompa Tandem

- In caso occorra procedere alla restituzione della pompa ricordarsi di:
  - disinfettarla
  - inserire il «tappo» in dotazione nell'alloggiamento della cartuccia
  - spegnerla (collegarla all'alimentazione e tenere premuto tasto schermo ON/bolo rapido per 45 secondi fino alla comparsa di un segnale acustico)
  - utilizzare il pacco (prepagato) ricevuto da Movi per spedirla
- In caso di viaggi:
  - Richiedere al centro diabetologico l'apposito documento
  - Scaricare dal portale Movi e-Lab l'apposito documento
  - Possibilità di aderire al programma Holiday riservato a coloro che soggiorneranno all'estero (ovunque) o in Italia (in luoghi del ns. Paese non raggiungibili dai Corrieri Espressi entro i 3gg. lavorativi successivi alla chiamata di assistenza effettuata al Numero Verde Movi) per un periodo da un minimo di 7 gg. ad un massimo di 30 gg.

Potranno accedere al programma esclusivamente gli Assistiti che hanno in dotazione una Pompa per Insulina Tandem ancora in garanzia e regolarmente acquistata dall'ASL di appartenenza. Movi precisa che, essendo questo un servizio totalmente gratuito e non incluso nelle Condizioni Generali di Garanzia, lo stesso sarà disponibile fino all'esaurimento delle Pompe per Insulina messe a disposizione per questo specifico Programma.

È possibile aderire al Programma Holiday attraverso il portale Movi e-lab  
<https://movi-elab.it/utilizzatori/#holiday>

# Impostare una pompa nuova

- Collegare la pompa alla presa di corrente utilizzando il cavo USB ed il trasformatore originali
- La pompa si accende in autonomia dopo 30-45 secondi e compare la schermata di blocco
- Il livello della batteria all'accensione viene visualizzato al 5%, dopo qualche secondo compare il reale livello della batteria. **È consigliato lasciare la pompa sotto carica fino al raggiungimento del 100%**
- Sbloccare la pompa (1, 2, 3), selezionare la lingua e premere AVVIA
- Selezionare **Opzioni, La mia pompa, Avvisi e Promemoria**
  - **Avvisi Pompa:**  
**Insulina bassa:** impostare questo avviso tenendo conto del **fabbisogno insulinico giornaliero** (boli + basale: Dose Totale Giornaliera)
- Selezionare **Opzioni, Imp. Dispositivo**
  - **Impostazioni Display:** Impostare Time-out schermo a 120 sec (suggerito)
  - **Ora e data:** **verificare SEMPRE che sia corretta**
  - **Volume Audio:** personalizzare i volumi, in questa schermata si trovano anche gli **Avvisi CGM**
  - **Pin di sicurezza:** Se la pompa viene utilizzata in **età pediatrica** è fortemente consigliato impostare il Pin di sicurezza (in caso non si ricordasse il Pin di sicurezza impostato è possibile sbloccare la pompa utilizzando il Pin di Fabbrica: 314159)

# Impostare una pompa nuova

## ▪ Selezionare **Opzioni, La mia pompa, Profili personali**

- **Impostazioni pompa: Bolo max:** deve essere impostato tenendo conto del massimo bolo che viene somministrato (ad es: Bolo «Pizza»)

- **Limite basale:** deve essere impostato valutando la velocità basale massima utilizzata in tutti i Profili personali programmati

- **Profili personali:** inserire in ogni Profilo personale: **Velocità basale, FSI, I:C, Target glicemia** ed in **Impostazioni bolo: Durata Insulina Attiva (IOB) e attivare opzione Carb (ON)** se utilizzata (obbligatorio con la tecnologia Control-IQ per poterla attivare)

## ▪ Selezionare **Opzioni, Il mio CGM**

- **Avvisi CGM: inserire gli Avvisi di glicemia alta, bassa e ripetizione**  
**L'avviso di Fuori range** è impostato di default a 20 minuti

- **Se si utilizza Dexcom G6:** inserire l'ID del trasmettitore. Se il trasmettitore è già in uso occorre spegnere la pompa alla quale era associato ed **attendere 15 minuti** prima di inserire lo stesso ID nella nuova pompa. Se è attiva una sessione CGM spegnere la pompa senza arrestare la sessione. Avviare la sessione GCM nella nuova pompa **SENZA** inserire il codice sensore (selezionare Ignora) dopo circa 10 minuti la pompa riprende a visualizzare le glicemie riallacciandosi alla sessione CGM in corso.

# Impostare una pompa nuova

- Selezionare **Opzioni, La mia pompa, Control-IQ**
  - **Inserire Peso e Dose Totale Giornaliera** (recuperare l'informazione aggiornata nella vecchia pompa (cronologia pompa > Riepilogo erogazioni > media 14 giorni) oppure dallo scarico dati nella pagina Riepilogo)
  - **Attivare la funzione Control-IQ (ON)**
- Selezionare **Opzioni, Attività**
  - **Impostare almeno 1 programma Sonno**









Your Health. Our Mission

**MOVI S.p.A**

Via Dione Cassio 15 | 20138 Milano

Tel. +39 02 509051 | Fax +39 02 5061048

[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

Numero Verde: 800-272777